

1. Účel použití:

Výškově nastavitelný čalouněný taburet je určen pro vyšetřující personál nemocničních i pečovatelských zařízení při vyšetření/ošetření pacienta. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:

Všechny plochy taburetu je třeba chránit před přímým ohněm a stykem s ostrými předměty, před prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním.

3. Technický popis a základní parametry:

Vrchní sedací plocha o průměru 40 cm je čalouněna zdravotnickou koženkou nebo mikroplyšem a je výškově stavitelná pomocí trapézového šroubu v rozmezí od 47 do 63 cm. Kovový podvozek s povrchovou úpravou chromem je osazen pěti otočnými kolečky s brzdou. Hmotnost 8 kg, nosnost 150 kg.

4. Návod k montáži a použití:

Taburet je dodáván ve zkompletovaném stavu. Po odstranění všech částí obalu je připraven k použití. Taburet zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách, naopak odbrzdění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabrzděného kolečka. Polohování sedací plochy se provádí otáčením sedací plochy ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Otáčením taburetu proti směru hodinových ručiček dochází k plynulému zdvihu sedací plochy až k dorazu, který je ve výšce 63 cm nad podlahou. Opačným směrem polohujete sedací plochu do jejího minima, které je ve 47 cm nad podlahou.

5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme taburet řádně vyčistit. Taburet čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví (v případě mikroplyše vysávejte). Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o taburet mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Taburet není určen do myček ani sterilizátorů!

6. Údržba a servis:

Taburet nevyžaduje žádnou údržbu ani servis.

7. Záruka:

Na taburet je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluchnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztrďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, textilní, plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

- 1 x Čalouněný taburet
- 1 x Návod k použití