

1. Účel použití:

Chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá k udržení stability při chůzi a odlehčení dolních končetin. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru! Je zakázáno chodítko používat v exteriéru!

2. Varování:

Vhodnost použití chodítka musí vždy posoudit ošetřující lékař s přihlédnutím k diagnóze a zdravotnímu stavu pacienta. Chodítko nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5°, rampách a na schodištích. Chodítko nesmí být použito k přepravě nepohyblivých osob, nákladů apod.. Konstrukce chodítka je navržena na maximální rovnoměrné zatížení 130 kg.

3. Technický popis a základní parametry:

Chodítko je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podpažní opěrky jsou čalouněny koženkou, držadla jsou plastová a předloketní opěrky z polyuretanu. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými a vzadu dvěma pevně aretovanými kolečky. Do horního svislého rámu jsou zapuštěny výsuvné podpažní opěrky a na nich stavitelné předloketní opěrky s držadly.

Rozměry a parametry daných typů:

U-2A: délka 600 mm, šířka 500 mm, měnitelná výška 1040 – 1520 mm, hmotnost 12 kg.

U-2A dětské: délka 500 mm, šířka 400 mm, měnitelná výška 840 – 1320 mm, hmotnost 10 kg.



4. Návod k montáži:

Po vyjmutí chodítka z přepravního obalu odstraňte veškerý balicí materiál, kterým je chodítko opatřeno. Spodní díl ① (rám s kolečky) postavte na zem. Ze šroubů na spodním konci horního dílu ④ sejměte čtyři matice ② a čtyři podložky ③. Horní díl chodítka ④ nasadte na spodní díl s kolečky, ① a to tak, že šrouby v obou stojnách provléknete v otvorech spodního dílu. Horní díl musí spojovacím obloukem obou svislých částí směřovat dopředu, tj. směrem k předním otočným kolečkům. Ze spodní strany rámu nasadte na všechny čtyři šrouby vždy nejprve podložku ③ a poté samozajišťovací matici M8 ② a pevně dotáhněte klíčem č.13. Povolněním plastových růžic šroubů na horní části rámu ⑤ uvolníte vždy samostatně každou z podpažních opěr ⑥. Ty nastavte vysunutím na požadovanou výšku a pootočením na potřebnou šířku a pevně utáhněte. Vysunutí lze provést max. do výšky označené ryskou. Ta musí být vždy skryta v nosné trubce. Obdobným způsobem seřídte pomocí plastových růžic ⑧, ⑨ i výšku a natočení předloketních opěrek ⑦. Všechny spojovací klouby řádně dotáhněte. Před vlastním užitím podrobte chodítko zkoušce zdravé osobě s minimálně stejnou hmotností jakou má uživatel chodítka (ne však vyšší než je maximální přípustné rovnoměrné zatížení chodítka). Po zdárné zkoušce je chodítko připraveno k užívání.



5. Návod k použití:

Chodítko vždy používejte pouze v interiéru, a to na rovných plochách, jejichž sklon nepřevyšuje 3,5°. V opačném případě by mohlo dojít k převrnutí chodítka i s obsluhou a ublížení na zdraví či poškození okolních předmětů. Podpažní opěry musí podpírat v přirozeném postoji uživatele v podpaží a to tak, že jej nenutí stát na špičkách, ani pokrčovat kolena. Nastavení podpažních opěr provádíte povolněním šroubu ⑤, vysunutím resp. zasunutím podpažní opěry a následným důkladným dotažením šroubů ⑤. Předloketní opěrky nastavte tak, aby se předloktí svírající s paží 90° rovnoměrně opíralo o polyuretanové výstelky. Při správném nastavení

úchytů rukou a podpažních opěr je váha rovnoměrně roznesena v podpaží a v předloktí. V opačném případě budou jednotlivé partie rukou či podpaží namáhány nerovnoměrně. Toto nerovnoměrné rozložení zatížení se projeví předčasnou bolestí více namáhaných partií. Proto dbejte na důkladné nastavení a přizpůsobení podpažních opěr a úchytů ruky před vlastním užíváním.

6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme chodítko řádně vyčistit. Chodítko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o chodítko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Chodítka nejsou určena do myček ani sterilizátorů!

7. Údržba:

Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.

Pokud dojde při údržbě chodítka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

8. Servis:

Chodítka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

9. Záruka:

Na chodítko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídíte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

11. Obsah balení:

1 x Chodítko dle specifikace výše

1 x Návod k použití