

1. Účel použití:

Chodítka je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá k udržení stability při chůzi a odlehčení dolních končetin. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru! Je zakázáno chodítka používat v exteriéru!

2. Varování:

Vhodnost použití chodítka musí vždy posoudit ošetřující lékař s přihlédnutím k diagnóze a zdravotnímu stavu pacienta. Chodítka nesmí být používána na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5°, rampách a na schodištích. Chodítka nesmí být použito k přepravě nepohyblivých osob, nákladů apod.. Konstrukce chodítka je navržena na maximální rovnoměrné zatížení 130 kg.

3. Technický popis a základní parametry:

Chodítka je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podpůrná deska ve tvaru U je čalouněna zdravotnickou koženkou. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými kolečky bez brzdy a vzadu dvěma otočnými kolečky s brzdou. Do horního svislého rámu jsou zapuštěny dvě výsuvné podpěry horní desky.

Rozměry a parametry daných typů:


U-2B: délka 600 mm, šířka 500 mm, měnitelná výška 960 – 1440 mm, hmotnost 13 kg

U-2B dětské: délka 500 mm, šířka 400 mm, měnitelná výška 760 – 1240 mm, hmotnost 11 kg



4. Návod k montáži:

Po vyjmutí chodítka z přepravního obalu odstraňte veškerý balicí materiál, kterým je chodítka opatřeno. Spodní díl ① (rám s kolečky) postavte na zem. Ze šroubů na spodním konci horního dílu ④ sejměte čtyři matice ② a čtyři podložky ③. Horní díl chodítka ④ nasadte na spodní díl s kolečky, a to tak, že šrouby obou noh provléknete v otvorech spodního dílu. Horní díl musí spojovacím obloukem obou svislých částí směřovat dopředu, tj. směrem k předním otočným kolečkům. Ze spodní strany rámu nasadte na všechny čtyři šrouby vždy nejprve podložku ③ a poté samozajišťovací matici M8 ② a pevně dotáhněte klíčem č.13. Povolněním plastových růžic šroubů na horní části rámu ⑤ uvolníte vždy samostatně každou z podpěr desky ⑥. Ty nastavte vysunutím na požadovanou výšku a pevně utáhněte. Vysunutí lze provést max. do výšky označené ryskou. Ta musí být vždy skryta v nosné trubce. Uvolněním matic s plastovým krytem ⑦ pod čalouněnou deskou po obou jejích stranách seřídte vysunutím a natočením úchyty rukou ⑦. Po nastavení do požadované polohy matice pevně dotáhněte. Všechny spojovací klouby řádně dotáhněte. Před vlastním užitím podrobte chodítka zkoušce zdravé osobě s minimálně stejnou hmotností jakou má uživatel chodítka (ne však vyšší než je maximální přípustné rovnoměrné zatížení chodítka). Po zdárné zkoušce je chodítka připraveno k užívání.

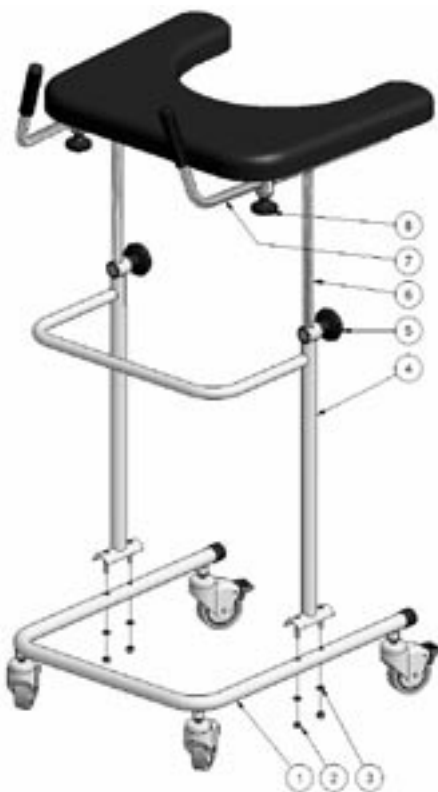

5. Návod k použití:

Chodítka vždy používejte pouze v interiéru, a to na rovných plochách, jejichž sklon nepřevyšuje 3,5°. V opačném případě by mohlo dojít k převrnutí chodítka i s obsluhou a ublížení na zdraví či poškození okolních předmětů. Chodítka zabrzdíte sešlápnutím brzdě páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrzdění provedete nadzvednutím brzdě páčky každého zabrzděného kolečka. Podpažní opěra musí rovnoměrně podpírat v přirozeném postoji paže uživatele od loktů směrem k zápěstím (předloktí s paží by mělo svírat uhel 90°). V poloze kdy se předloktí plně opírá o podpažní opěru nesmí uživatel stát na špičkách, ani nesmí cítit potřebu pokrčovat kolena. Nastavení podpažní opěry provádíte povolením šroubů ⑤, vysunutím resp. zasunutím podpažní opěry a následným důkladným dotažením šroubů ⑤. Úchyty rukou nastavte tak, aby je obě opřené ruce mohly pohodlně uchopit a dle potřeby je vytočte. Při správném nastavení úchyty rukou a podpažních opěr je váha rovnoměrně roznesena po obou předloktích rukou. V opačném případě budou jednotlivé partie předpaží namáhány nerovnoměrně. Toto nerovnoměrné rozložení zatížení se projeví předčasnou bolestí více namáhaných částí. Proto dbejte na důkladné nastavení a přízpusobení podpažní opěry a úchyty rukou před vlastním užíváním.

6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme chodítko řádně vyčistit. Chodítko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o chodítko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Chodítka nejsou určena do myček ani sterilizátorů!

7. Údržba:

Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.

Pokud dojde při údržbě chodítka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

8. Servis:

Chodítka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

9. Záruka:

Na chodítko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříděte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

11. Obsah balení:

1 x Chodítko dle specifikace výše

1 x Návod k použití