

1. Účel použití:

Dětská polohovací postýlka je určena pro domácí a ústavní použití při péči o malé děti. Svými technickými vlastnostmi je určena výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:

Postýlka nesmí být používána na šikmých plochách. Není určena k odkládání ani k převážení břemen apod. Maximální nosnost postýlky je 70 kg.

Pokud je ložná plocha postýlky napolohována (zádový díl není ve vodorovné pozici s nožním dílem), nesmí být postýlka s pacientem ponechána bez dozoru! Při zvýšené aktivitě pacienta by mohlo dojít k jeho skřípnutí či propadnutí za napolohovaným zádovým dílem!!!

3. Technický popis a základní parametry:

Dětská postýlka je vyrobena z ocelových profilů a trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným a chromovaným a dále z nerezových částí. Je vybavena dvěma výsuvnými zábranami s drátěnou výplní se zajištěním ve třech polohách. Ložná plocha je dvoudílná s výplní z ocelových lamel s možností zvedání do poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg. Zádový díl je mechanicky polohovatelný pomocí hřebenu. Postýlka je standardně vybavena dvěma plastovými aretovanými a dvěma otočnými kolečky s brzdou o průměru 75 mm. Na přání lze provést v libovolném barevném provedení.



Rozměry a parametry daných typů:

DPL-55-T: Délka 110 cm, šířka 55 cm, výška 150 cm, hmotnost 53 kg, nosnost 70 kg

DPL-70-T: Délka 140 cm, šířka 70 cm, výška 150 cm, hmotnost 63 kg, nosnost 70 kg

4. Návod k montáži:

Dětská polohovací postýlka je včetně koleček dodávána ve smontovaném stavu. Po vyjmutí z přepravního obalu a odstranění veškerého balicího materiálu je postýlka připravena k použití. Při odstraňování balicího materiálu dbejte na řádné odstranění všech provázků označených symbolem nůžek, kterými jsou fixovány pohyblivé části postýlky!!!!

5. Návod k použití:

Umístěte postýlku na vhodné místo tak, aby se žádnou svojí částí nedotýkala okolních předmětů či zdí. Polohování zádové části ložné plochy postýlky je zajištěno pomocí hřebenu. Uchopte na libovolné straně postýlky madlo zádového dílu a zvedněte pomocí něj zádový díl ložné plochy do požadované polohy. V průběhu polohování je slyšet tiché cvakání. Toto cvakání informuje obsluhu o dosažení aretované polohy hřebenu, který drží zádový díl v požadované poloze. Po každém cvaknutí můžete uvolnit zádový díl ložné plochy a on setrvá v dosažené poloze. Po dosažení maximální polohy napolohování zádového dílu dojde k odjištění hřebenu a zádový díl lze spustit do vodorovné polohy. Z libovolné aretované polohy lze zádový díl také spustit do vodorovné polohy, a to zvednutím zádového dílu o cca 5-7° (avšak méně, než hřeben dosáhne další možné polohy!) a následným spuštěním do vodorovné polohy. Pokud se Vám neodjistí aretace hřebenu a zádový díl nadále setrvá v původní poloze, pokuste se jej nadzvednout o trochu výše a opakovat celý postup. Nikdy nespouštějte samočinně zádový díl ložné plochy z vyšších poloh do nižších, aniž byste jeho pohyb kontrolovali rukou. Mohlo by dojít k mechanickému poškození zádového dílu, hřebenu, rámu, či ublížení na zdraví!!!!

Zvedání ložné plochy do poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg se provádí pomocí madel v obou čelech postýlky. Pomocí madla na libovolné straně lůžka nadzvednete ložnou plochu, zasuňte, nastavte požadovanou výšku ložné plochy a opět vysuňte a uvolněte tak, aby aretační háčky usedly na příčky polohovacích žebříků.

Výsuvné zábrany lze zajistit ve třech polohách pomocí zajišťovacího mechanismu, umístěného uprostřed postýlky pod ložnou plochou. V nejnižší poloze zábrany je aretační mechanismus zasunut pod lůžkem. Pro dosažení střední polohy výškového nastavení zábrany zvedněte zábranu jednou rukou do maximální polohy a druhou rukou vysuňte plastovou růžici z domečku umístěného pod ložnou plochou až k dorazu. Následně spusťte zábranu na vysunutou aretační růžici. Pro dosažení nejvyšší polohy výškového nastavení zábrany jednou rukou zvedněte zábranu do nejvyšší polohy, druhou rukou vysuňte plastovou růžici z domečku umístěného pod ložnou plochou až k dorazu a pootočte s ní o 180° v libovolném směru. Následně spusťte zábranu do kolébky. Spuštění zábrany do nejnižší polohy provedete jejím nadzvednutím do maximální výškové pozice, spuštěním kolébky k zemi (pootočením plastovou růžicí o 180° libovolným směrem), zasunutím plastové růžice pod lůžko až na doraz a následně spustit zábranu k zemi. Zábrany lze polohovat nezávisle na sobě. Nikdy nespouštějte samočinně zábrany z vyšších poloh do nižších, aniž byste je drželi v ruce. Mohlo by dojít k mechanickému poškození zábrany, postýlky či zranění!!!!

6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme dětskou postýlku řádně vyčistit. Postýlku čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o dětskou postýlku mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Dětské postýlky nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

7. Údržba:

Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout, šrouby držící kolečka podvozku a výztuhy spojující ložnou plochu s čely lůžka.

Pokud dojde při údržbě postýlky k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

8. Servis:

Dětské postýlky nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

9. Záruka:

Na dětskou postýlku je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluchnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové a ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

11. Obsah balení:

- 1 x Dětská postýlka
- 1 x Návod k použití