

## 1. Účel použití:

Infúzní držák závěsný na hrazdu lůžka je určen výhradně pro zavěšování infúzních sáčků ve zdravotnictví.

## 2. Varování:

Infúzní držák závěsný na hrazdu lůžka je určen pouze pro hrazdy vyráběné firmou PROMA REHA s.r.o.! Je určen pro použití v interiéru a jeho maximální zatížení na jeden háček je 3 kg.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Vlastní tělo infúzního držáku je vyrobeno z ocelových profilů s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky. Uchytení držáku na hrazdu je realizováno pomocí objímky a aretačního šroubu s plastovou hlavicí. Držák je osazen čtyřmi háčky pro umístění infúzních sáčků.



### Základní technické parametry infúzního držáku:

Délka 250 mm, šířka 50 mm, výška 150 mm, hmotnost 2 kg.

## 4. Návod k montáži a použití:

Infúzní držák závěsný na hrazdu lůžka je dodáván ve zkompletovaném stavu a po odstranění všech částí obalu je připraven k okamžitému použití. Po povolení plastové růžice šroubu ve střední části držáku jej nasuňte na hrazdu lůžka do požadované pozice a plastovou růžici šroubu opět řádně dotáhněte. Při nasouvání držáku na hrazdu vždy dbejte na to, aby držák svými háčky vždy směřoval vzhůru, tzn. aby se infúzní sáčky zavěšovaly na háčky od stropu a ne od země. Pozor na řádné dotažení plastové růžice, neboť při nedostatečném dotažení by mohl infúzní držák samovolně sjet z hrazdy a svým nežádoucím pohybem a ztrátou funkce by mohl způsobit ublížení na zdraví či poškození okolních předmětů.



## 5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme infúzní držák řádně vyčistit. Držák čistíte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátětky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o držák mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Držák infúzí není určen do myček ani sterilizátorů!

## 6. Údržba a servis:

Infúzní držák nevyžaduje žádnou údržbu ani servis.

## 7. Záruka:

Na infúzní držák je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluknost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříděte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 9. Obsah balení:

1 x Infúzní držák závěsný na hrazdu lůžka , 1 x Návod k použití