

1. Účel použití:

Infúzní stojan pojízdný je určen výhradně pro zavěšování infúzních lahví a sáčků ve zdravotnictví.

2. Varování:

Pojízdný infúzní stojan je určen výhradně pro použití v interiéru. Stojan nesmí být používán na šikmých plochách, jejichž sklon převyšuje 3° a není určen pro zavěšování jiných předmětů, než infúzních lahví a sáčků. Při použití pojízdného infúzního stojanu musí být minimálně dvě kolečka zabrzděna. Maximální zatížení pojízdného infúzního stojanu je 15 kg.

3. Technický popis a základní parametry:

Vlastní tělo infúzního stojanu je vyrobeno z ocelových profilů s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky. Podvozek je plastový a je osazen pěti samostatně brzditelnými kolečky. Vlastní výškově stavitelný držák infúzních lahví a sáčků je vyroben z ocelových profilů s povrchovou úpravou chromem.

Základní technické parametry pojízdného infúzního stojanu:

Výška 1615 - 2300 mm, max. šířka 630 mm, hmotnost 4 kg.

4. Návod k montáži a použití:

Infúzní stojan pojízdný je dodáván ve zkompletovaném stavu a po odstranění všech částí obalu je připraven k okamžitému použití. Po povolení plastové růžice šroubu ve vrchní části podvozku se uvolní vlastní výsuvný držák infúzních lahví a sáčků. Povolte plastovou růžici, vysuňte či zasuněte do požadované polohy chromovaný držák infúzních lahví či sáčků a dotáhněte plastovou růžici šroubu. Růžici dotáhněte pečlivě, neboť při nedostatečném dotažení by mohl infúzní držák samovolně zajet do nohy držáku a svým nežádoucím pohybem by mohl způsobit ublížení na zdraví, či poškození okolních předmětů.

5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme infúzní stojan řádně vyčistit. Stojan čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o stojan mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Pojízdný infúzní stojan není určen do myček ani sterilizátorů!

6. Údržba a servis:

Infúzní stojan nevyžaduje žádnou údržbu ani servis.

7. Záruka:

Na infúzní stojan je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

1 x Infúzní stojan pojízdný, 1 x Návod k použití

