

1. Účel použití:

Infúzní stojan je určen k připevnění na zeď a výhradně pro zavěšování infúzních lahví a sáčků ve zdravotnictví.

2. Varování:

Infúzní stojan je určen pouze pro použití v interiéru a jeho maximální zatížení je 15 kg.

3. Technický popis a základní parametry:

Celý infúzní stojan je vyroben z nerezových profilů a plechů. Pevná deska je osazena otvory pro připevnění stojanu ke zdi. Vlastní držák infúzí je vybaven teleskopickým otočným mechanismem v rozsahu 0-180° s automatickou aretací ve třech pozicích. Maximální dosah infúzního stojanu od místa upevnění ke zdi je 170 cm.

Základní technické parametry infúzního stojanu k lůžku:

Výška 200, šířka 100 mm, maximální výsun 1700 mm, hmotnost 6 kg.

4. Návod k montáži a použití:

Infúzní stojan je dodáván ve zkompletovaném stavu. Po odstranění všech částí obalu přiložte stojan na nosnou stěnu nosnou deskou do místa, kde jej chcete osadit. Nejčastější místo umístění bývá mezi dvěma lůžky (infúzní stojan obslouží vždy jedno z nich) nebo nad lůžkem (infúzní stojan obslouží vždy jedno až ze tří lůžek). Doporučená poloha výškového umístění stojanu je 180 cm spodní hrany nosné desky nad podlahou. Dle nosné desky obkreslete otvory pro vruty na stěnu. Vrtačkou s upevněným vidiovým vrtákem o $\varnothing 10$ mm vyvrtejte otvory minimálně 50 mm hluboké pro hmoždinky. Otvory řádně vyčistěte od zbytků omítky a prachu a zatlačte do nich hmoždinky. Zkontrolujte, zda všechny hmoždinky pevně drží v otvorech. Poté přiložte držák ke stěně a pomocí vrutů do hmoždinek jej připevněte. Všechny vruty řádně dotáhněte klíčem č.10. Tím je držák připraven k používání.

Při manipulaci s infúzním stojanem dejte pozor na možné kolize s přístroji, lůžky a jejich příslušenstvím (hrazdy, infúzní stojany apod.) apod.

5. Čištění:

Stojan čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o stojan mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Teleskopický infúzní stojan není určen do myček ani sterilizátorů!

6. Údržba a servis:

Infúzní stojan nevyžaduje žádnou údržbu ani servis. Jedenkrát za rok zkontrolujte jeho upevnění ke zdi.

7. Záruka:

Na infúzní stojan je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové a plastové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

1 x Infúzní stojan teleskopický, 4 x Vrut s čokkovou hlavou, 4 x Podložka zinkovaná, 4 x Hmoždinka, 1 x Návod k použití

