

1. Účel použití:

Křeslo pro kardiaky je určeno pro vybavení nemocnic, ústavů sociální péče a také pro domácí ošetřování. Polohování zádové a sedací části umožňuje velmi pohodlné sedání, sezení a vstávání z křesla. Odklopné područky umožňují snadné přesunutí pacienta do křesla jak z vozíku, tak i z lůžka. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:

Kardiacké křeslo nesmí být používáno na šikmých plochách, rampách a na schodištích. Konstrukce křesla je navržena na maximální rovnoměrné zatížení 150 kg.

3. Technický popis a základní parametry:

Křeslo je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podloketní opěrky jsou pevné nebo odklopné (dle typu křesla). Zádová část, sedací část a područky jsou čalouněny dle přání zákazníka mikroplyšem nebo zdravotnickou koženkou. Vlastní polohování a aretování v daných polohách kardiackého křesla je realizováno mechanicky. Po obou stranách sedací plochy je umístěna ovládací páka pro polohování křesla. Křesla mohou být vybavena čtyřmi kolečky s brzdou a z vnější strany zádového dílu madlem pro usnadnění ovládní křesla.



Základní parametry:

délka při napolohování 120 cm, šířka 80 cm, šířka sedáku 55 cm, výška sedáku 48 cm, hmotnost 30 kg, nosnost 150 kg

Další parametry dle typů:

KB-01: není vybaveno kolečky, odklopné područky, polohování pomocí hřebenu

KB-02: je vybaveno kolečky, odklopné područky, polohování pomocí hřebenu, madlo zádového dílu

KB-01 Z: není vybaveno kolečky, pevné područky, polohování pomocí hřebenu, zesílená konstrukce

KB-02 Z: je vybaveno kolečky, pevné područky, polohování pomocí hřebenu, zesílená konstrukce, madlo zádového dílu

4. Návod k montáži:

Po vyjmutí kardiackého křesla z přepravního obalu odstraňte veškerý balicí materiál, kterým je křeslo opatřeno. Kardiacké křeslo se dodává ve zkompleťovaném stavu a je tedy připraveno k použití. Umístěte jej v prostoru tak, aby za zádovým dílem zůstal volný prostor minimálně 70 cm. V tuto chvíli je křeslo připraveno k použití.

Pokud páku nadzvednete dále (více vychýlíte) a budete pokračovat v tlaku na zádovou část, pak se tato zádová část postupně sklápí vzad a zároveň se vysouvá opěrka nohou. Uvolněním páky v jakékoliv poloze zádového dílu jej zajistíte v dosažené poloze. Zpětný pohyb provedete opětovným nadzvednutím páky vedle sedací části a mírným tlakem obou nohou na opěrku nohou, a to až do výchozí polohy, kde se křeslo zajistí. Z této polohy se obtížně vstává, a proto sedák umožňuje přechod do polohy, která Vám maximálně usnadní vystoupení z křesla. Do této polohy se dostanete lehkým nadzvednutím páky v základní poloze a předkloněním. Při předklonění se sedací část naklopí vpřed a maximálně Vám napomůže při vstávání.

5. Návod k použití:

Kardiacké křeslo zabrzdíte sešlápnutím brzděné páčky vždy minimálně na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzděné páčky každého zabrzděného kolečka. Po usednutí do křesla lehce nadzvedněte páku nacházející se po straně sedáku (stačí na jedné straně a je libovolné, zda na pravé či levé) a mírným tlakem do zádové části dosáhnete naklonění sedací části do zadní polohy. Područky odklopíte po zatažení za zajišťovací kolík a současným tlakem na područku vzhůru. Po vychýlení z aretované polohy můžete zajišťovací kolík uvolnit. Při sklápění se područky zajistí samočinně. Pokud páku po straně sedáku nadzvednete dále (více vychýlíte) a budete pokračovat v tlaku na zádovou část, pak se tato zádová část postupně sklápí vzad. Uvolněním páky dojde k zajištění zádového dílu v nejbližší možné poloze. Zpětný pohyb provedete opětovným nadzvednutím páky vedle sedací části a mírným předkloněním (uvolněním tlaku zad na opěrací část). Takto křeslo napolohujete až do základní polohy. Z této polohy se obtížně vstává, a proto sedák umožňuje přechod do polohy, která Vám maximálně usnadní vystoupení z křesla. Do této polohy se dostanete lehkým nadzvednutím páky v základní poloze a předkloněním. Při předklonění se sedací část naklopí vpřed a maximálně Vám napomůže při vstávání.

Při polohování kardiackého křesla buďte velmi ostražití, neboť polohováním dochází k pohybu zádové i nožní části vzhledem ke střednímu pevnému dílu. Při polohování křesla by mohlo dojít ke zranění uživatele, okolních osob či poškození okolních předmětů. Před i za kardiackým křeslem musí být v základní poloze (pře polohováním) minimálně 50 cm volného místa.

Do kardiackého křesla vybaveného kolečky usedejte vždy až po jeho zabrzdění. V opačném případě by se mohlo stát, že odbrzděné křeslo při sednutí popojede. Mohlo by dojít k poranění obsluhy, uživatele či okolních věcí!!!

6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme kardiacké křeslo řádně vyčistit. Před každým dalším použitím by měly být vždy řádně očištěny sedací a opěrné plochy včetně podloketních opěrek. Křeslo čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o kardiacké křeslo, mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Kardiacké křeslo není určeno do myček ani sterilizátorů!!!

7. Údržba:

Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku a dvě vzpěry podvozku. Imbusové šrouby jsou ukryty pod plastovými krytkami z vnější strany noh podvozku.

Pokud dojde při údržbě křesla k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

8. Servis:

Kardiacká křesla nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

9. Záruka:

Na kardiacké křeslo je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

11. Obsah balení:

- 1 x Kardiacké křeslo dle specifikace výše
- 1 x Návod k použití