

## 1. Účel použití:

Stolec ke kardiackému křeslu je určen jako doplněk kardiackého křesla pro usnadnění denních potřeb uživatelů. Slouží k výkonu jednoduchých ručních prací, čtení apod. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru!



## 2. Varování:

Stolec lze připevnit pouze na kardiacká křesla typu KBL-xx vyráběná firmou PROMA REHA s.r.o.. Dřevěnou plochu je třeba chránit před přímým ohněm a stykem s ostrými předměty, před prudkými nárazy či jiným mechanickým namáháním. Při nasunutém stolku nelze odklápět područky.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Stolec je vyroben z ocelových trubek a lamino desky s hranami ABS. Rám stolku je povrchově upraven práškovým lakem. Vlastní polohování stolku je zajištěno hřebem.

## 4. Návod k montáži a použití:

Stolec je dodáván ve zkompletovaném stavu. Po odstranění všech částí obalu stolec nasuňte na konce trubek područek kardiackého křesla. Stolec nasunujte v cca 10° sklonu ke kardiackému křeslu. Ve chvíli kdy je dostatečně nasunut na trubky područek, sám klesne do vodorovné polohy a zajistí se proti samovolnému vyjetí. Polohování desky stolu se provádí pomocí hřebenu, a to nadzvednutím desky vzhůru do požadované polohy. V průběhu polohování je slyšet tiché cvakání. Toto cvakání informuje uživatele o dosažení aretované polohy hřebenu, který drží pracovní desku v požadované poloze. Po každém cvaknutí můžete uvolnit pracovní desku a ta setrvá v dosažené poloze. Po dosažení maximální polohy napolohování jídelní desky dojde k odjištění hřebenu a pracovní desku stolu lze spustit do vodorovné polohy. Z libovolné aretované polohy lze pracovní desku také spustit do vodorovné polohy, a to zvednutím o cca 5-7° (avšak méně, než hřeben dosáhne další možné polohy !) a následným spuštěním do vodorovné polohy. Pokud se Vám neodjistí aretace hřebenu a pracovní deska nadále setrvá v původní poloze, pokuste se ji nadzvednout o trochu výše a opakovat celý postup. Nikdy nespouštějte samočinně pracovní desku stolku z vyšších poloh do nižších, aniž byste její pohyb kontrolovali rukou. Mohlo by dojít k mechanickému poškození pracovní desky, hřebenu, či rámu stolku nebo ublížení na zdraví!!!! Při demontáži stolku postupujte následovně. Uchopte jej za rám pod pracovní deskou, nadzvedněte směrem vzhůru a zatáhněte směrem od kardiackého křesla. Nadzvednutím stolku dojde k jeho odjištění a následně stažení z trubek područek. V případě kardiackého křesla s kolečky montujte a demontujte stolec vždy pouze se zabrzděnými kolečky. V opačném případě by mohlo dojít k nežádoucímu posunu kardiackého křesla a poškození okolních věcí, případně i k ublížení na zdraví!!!!



## 5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme stolec řádně vyčistit. Před každým dalším použitím by měla být vždy řádně očištěna pracovní deska. Stolec čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o stolec mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Stolec není určen do myček ani sterilizátorů!

## 6. Údržba a servis:

Stolec nevyžaduje žádnou speciální údržbu ani servis.

## 7. Záruka:

Na stolec kardiackého křesla je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

## 8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Výrobek společně s dřevěnými díly byl podroben laboratorním zkouškám a získal licenci k užívání ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídíte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 9. Obsah balení:

- 1 x Stolek pro kardiacké křeslo KBL-xx,
- 1 x Návod k použití