

1. Účel použití:

Návlek na zvýšené UNI zábrany je určen jako příslušenství pro lůžka firmy PROMA REHA s.r.o., která jsou vybavena zvýšeným UNI bedněním typu Z. Slouží jako zábrana proti poranění neklidného pacienta na lůžku. Návlek slouží k zabránění prostupnosti horních a dolních končetin uživatele lůžka skrz zábrany, zabránění jejich nechtěnému odjištění a pro tlumení nárazu při kontaktu s nimi. Svými technickými vlastnostmi je návlek určen výhradně pro použití v interiéru, a to s lůžky vyráběnými firmou PROMA REHA s.r.o..



2. Varování:

Návlek je nutné chránit před stykem s ostrými předměty, prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním. Návleky nesmí být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření.

3. Technický popis a základní parametry:

Návlek na zvýšené UNI zábrany je vyroben ze zdravotnické koženky a molitanu. Z vnitřní strany lůžka je celistvý, z vnější strany lůžka je opatřen čtyřmi otvory, kterými se ovládají zábrany lůžka. Ve spodní části je návlek opatřen suchým zipem pro snadné připevnění k lůžku.

4. Návod k montáži a použití:

Před vlastním připevněním návleku na lůžko nejprve napolohujte zábrany do maximální pozice od země. Následně přes ně přetáhněte návlek tak, aby z vnitřní strany lůžka byl návlek plný a z vnější strany byly čtyři otvory (viz. obrázek výše). Návlek nastavte tak, aby mezi otvory procházela střední zábrana. Návlek má na obou svých koncích připevněn suchý zip, pomocí kterého se pod spodní zábranou spojuje v celistvý kus. Nejprve návlek vypnete z vnitřní i vnější strany lůžka a následně pod spodní zábranou překryjte oba konce suchými zipy přes sebe. Při spojování si můžete pomoci mírným nadzvednutím nejnižší zábrany směrem vzhůru. Pozor však na to, aby vypnutý návlek nezvedal spodní zábranu z její nejnižší pozice. Po překrytí návleku suchým zipem v celé jeho délce je návlek se zvýšeným bedněním UNI připraven k použití.

5. Čištění:

Návlek čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky. Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o návlek zvýšených zábran mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Návlek není určen do myček ani sterilizátorů!!!

6. Údržba:

Návlek nevyžaduje žádnou údržbu ani pravidelný servis.

7. Záruka:

Na návlek na je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné textilní části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

1 x Návlek na zvýšené UNI zábrany, 1 x Návod k použití