

1. Účel použití:

Noční stolky bez jídelní desky jsou určeny pro ústavní a nemocniční péči, jsou příslušenstvím k lůžkům pro ukládání osobních předmětů. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:

Plechové, plastové i dřevěné části stolků nesmějí být vystaveny nepřiměřenému mechanickému namáhání, přímému ohni, ostrým předmětům, vodě apod..

3. Technický popis a základní parametry:

Noční stolky jsou dle typu vyrobeny z ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku, zinkovaným a chromovaným nebo z lamino desek. Stolky jsou opatřeny čtyřmi otočnými kolečky s brzdou. Obsahují zásuvku a dle typu jednu nebo dvě volně přístupné přihrádky s jednou uzavíratelnou. Na přání zákazníka je možné uzavíratelnou přihrádku doplnit o zámek. V případě jednostranného provedení nočního stolku lze o zámek doplnit i zásuvku. U dřevěných stolků lze zásuvku doplnit o plastovou vložku. Celokovové stolky jsou jí standardně vybaveny. Všechny stolky lze doplnit o držák ručniku. Parametry jednotlivých typů jsou upřesněny níže.

NS-11-O-C



oboustranný dřevěný,
42 x 45 x 80 cm,
hmotnost 29 kg

NS-12-O-C



oboustranný dřevěný s kovovým
rámem, drátěný rošt na obuv,
46 x 45 x 88 cm, hmotnost 30 kg

NS-31-O-C



oboustranný celokovový,
42 x 45 x 84 cm,
hmotnost 29 kg

NS-50-O-H



oboustranný celokovový, drátěný rošt
na obuv, 40 x 40 x 84 cm,
hmotnost 19 kg

4. Návod k montáži:

Po odstranění veškerého balícího materiálu je třeba dvířka a zásuvku opatřit úchyty. Úchyty včetně spojovacího materiálu jsou součástí dodávky a naleznete je přilepené ve vnitřní části uzavíratelné přihrádky. Dvířka i stolek jsou opatřeny otvory pro umístění úchytek. Prostrčte z vnitřní strany zásuvky resp. uzavíratelné přihrádky vždy pár šroubků a postupně připevněte všechny úchyty. Po důkladném dotažení je noční stolek připraven k použití. Pokud je noční stolek osazen zámky, sadu klíčů naleznete uvnitř uzavíratelné přihrádky nebo zásuvky.

5. Návod k použití:

Stolek zabrzdíte sešlápnutím brzděné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzděné páčky každého zabrzděného kolečka.

U všech nočních stolků je zásuvka doplněna o pojistný mechanismus, který zabraňuje jejímu úplnému vysunutí. V případě potřeby úplného vysunutí zásuvky (vyjmutí) postupujte následovně. Jednou rukou vysuňte zásuvku do krajní polohy na libovolnou stranu a druhou rukou nahmátněte aretační jazýček umístěný v zásuvce pod horní odkládací deskou nočního stolku. Tento jazýček se v krajní poloze maximálně vysunuté zásuvky opírá o její vnitřní zadní stěnu a brání jejímu úplnému vysunutí. Tento jazýček pootočte na libovolnou stranu směrem vzhůru pod odkládací deskou nočního stolku a posuňte jej po vodícím drátě mimo ložný prostor zásuvky (opačným směrem než se chystáte vysunout zásuvku). Ve chvíli kdy jazýček přestane zasahovat do vnitřního prostoru zásuvky ji můžete plně vysunout. Opačným postupem postupujte při zasouvání plně vysunuté (vyjmuté) zásuvky. Na straně, ze které chcete zásuvku zasazovat, pootočte aretačním jazýčkem libovolným směrem vzhůru tak, aby se opřel o spodní stěnu odkládací desky a v této pozici jej např. pomocí lepicí pásky fixujte. Následně nasuňte zásuvku tak hluboko, aby fixovaný jazýček byl v jejím ložném prostoru a současně se v zásuvce podařila odlepit lepicí páska, která aretační jazýček fixovala ke spodní straně odkládací desky. Následně odlepte lepicí pásku a přesvědčte se, že aretační jazýček visí směrem k zemi a je uvnitř ložného prostoru zásuvky. V takovém případě můžete zásuvku plně zasunout a noční stolek je opět plně připraven k použití.

Pokud je zapotřebí vyjmout plastovou vložku zásuvky u plechového nočního stolku, vysuňte nejprve zásuvku do maximální polohy vysunutí, vyjměte z ní všechny uložené předměty a tlakem ze spodní strany zásuvky směrem vzhůru vysuňte plastovou vložku zásuvky. U dřevěných stolků plně vysuňte zásuvku, vyjměte z ní všechny uložené předměty a pomocí tenkého pevného předmětu podeberte plastovou vložku zásuvky v libovolném místě po jejím obvodu. Po vysunutí vložky nad horní okraj zásuvky ji uchopte a vyjměte. V opačném případě do maximálně vysunuté zásuvky vložte plastovou vložku tak, aby dělicí prolis byl vždy umístěn podélně ve směru zasouvání resp. vysouvání zásuvky. Vložka musí být vložena bez použití jakéhokoliv násilí, kterým by mohla být znehodnocena. Pokud klade vložka při vkládání odpor, pootočte ji o 180° a pokus o vložení zopakujte. Pozor! Plastová vložka není čtvercového tvaru, proto záleží na její směrové orientaci!

Držák ručnicku je konstruován a výhradně určen pro odložení ručnicku, nikoliv pro zavěšování jakýchkoliv jiných břemen či manipulaci se stolkem. V takovýchto případech může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.

6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme noční stůl řádně vyčistit. Stolky čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků nebo nedostatečné či chybné péči o servírovací stůl mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Noční stolky nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

7. Údržba:

Vlivem dezinfekce a čištění může docházet k zanášení styčných ploch některých částí servírovacího stolku. Proto je nezbytné nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat a popřípadě ošetřit silikonovým olejem styčné plochy zásuvky a nosných kolejniček u plechových stolků. Dále je třeba zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby koleček.

Pokud dojde při údržbě nočního stolku k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

8. Servis:

Noční stůl nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

Bezpečnostně technická kontrola nočních stolků musí být ve vybraných zařízeních prováděna v periodě maximálně 2 let.

9. Záruka:

Na noční stůl je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluknost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Výrobek společně s dřevěnými díly byl podroben laboratorním zkouškám a získal licenci k užívání ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Rozřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

11. Obsah balení:

- 1 x Noční stůl
- 1 x Návod k použití
- 1 x Sada klíčů (pouze pokud je stůl vybaven zámky)
- 1 x Plastová vložka zásuvky (pouze pokud je jí stůl vybaven)