

☐ univerzální D ____ mm,
 ☐ pevné krakorcové ____ mm,
 ☐ 135° 2 příruby,
 ☐ 135° 3 příruby,
 ☐ 2 x 135°,
 ☐ 90° levé,
 ☐ 90° pravé

1. Účel použití:

Madlo je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá při zvedání, sedání a při udržování stability. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:

Madlo nelze připevnit do nenosných stěn a příček, jako jsou např. bytová jádra, sádkartonové příčky, sádrové příčky, dřevěné příčky apod.

3. Technický popis a základní parametry:


Madla jsou vyrobena z nerezů nebo ocelových trubek a plechů s povrchem z práškového laku. Technické parametry jednotlivých typů jsou uvedeny níže.

Madlo univerzální D xxx



délka 300 – 1500 mm,
dvě příruby

Madlo pevné krakorcové

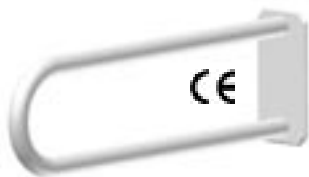

délka 600 a 800 mm,
jedna příruba

Madlo 135° 2 příruby



rozměr 400 x 400 mm,
2 příruby

Madlo 135° 3 příruby



rozměr 400 x 400 mm,
3 příruby

Madlo 2 x 135° 3 příruby



rozměr 300 x 300 x 300 mm,
3 příruby

Madlo 90° levé



rozměr 600 x 400 mm,
3 příruby

Madlo 90° pravé



rozměr 600 x 400 mm,
3 příruby

4. Návod k montáži a použití:

Po odstranění všech částí obalu madlo přiložte na nosnou stěnu nosnými kruhovými terči do místa, kde jej chcete osadit. Dle nosných terčů obkreslete otvory pro vruty na stěnu. Vrtáčkou s upevněným vidiovým vrtákem o ø8 mm vyvrtajte otvory minimálně 40 mm hluboké pro hmoždinky. Otvory řádně vyčistěte od zbytků omítky a prachu a zatlačte do nich hmoždinky. Zkontrolujte, zda všechny hmoždinky pevně drží v otvorech. Poté přiložte madlo ke stěně a pomocí vrutů do hmoždinek jej připevněte ke stěně. Všechny vruty řádně dotáhněte křížovým šroubovákem. Tím je madlo připraveno k používání.

5. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme madlo řádně vyčistit. Čistěte jej běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o madlo mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

6. Údržba:

Jedenkrát za rok zkontrolujte a popřípadě dotáhněte šrouby uchycení ke zdi.

7. Servis:

Madlo nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

8. Záruka:

Na madla je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

9. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídíte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové či ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

10. Obsah balení:

- 1 x Madlo dle specifikace výše
- 1 x Sada zápusťných vrtů s čochkovou hlavou (dle typu madla)
- 1 x Sada hmoždinek (dle typu madla)
- 1 x Návod k použití