

## 1. Účel použití:

Zástěna je určena k vytvoření soukromí při převlékání pacientů, k zamezení výhledu, k oddělení dvou pracovišť apod.. Svými technickými vlastnostmi je určena výhradně pro použití v interiéru!

## 2. Varování:

Zástěna je určena pouze k zamezení výhledu. Používání zástěny k odkládání oděvů, opírání břemen apod. je nepřipustné a může způsobit jak poškození vlastní zástěny, tak i jiného vybavení při jejím převrnutí.

## 3. Technický popis a základní parametry:

Rám zástěny je vyroben z ocelových trubek s povrchovou úpravou práškovým lakem. Zástěny jsou vyráběny ve vysokém a nízkém provedení s látkovou nebo plastovou výplní. Látková výplň je pratelná a velmi snadno vyjímatelná. Zástěna je dodávána s brzděnými plastovými kolečky o průměru 50 mm. Na přání zákazníka je možno dodat v libovolné barvě látkové výplně a barevného odstínu konstrukce. Dále lze dodat zástěnu i v celonerezovém provedení.

Zástěna vysoká jednodílná  
látková – ZV1L



ŠxHxV: 91 x 51 x 190,  
hmotnost 6 kg

Zástěna nízká dvoudílná  
látková – ZN2L



ŠxHxV(složené) : 75 x 51 x 110,  
ŠxHxV(rozložené) : 148 x 51 x 110,  
hmotnost 8 kg

Zástěna vysoká třídílná plastová –  
ZV3P



ŠxHxV(složené) : 75 x 51 x 190,  
ŠxHxV(rozložené) : 222 x 51 x 190,  
hmotnost 26 kg

## 4. Návod k montáži:

Všechny typy zástěn jsou dodávány s demontovanými nožičkami. Zástěny s látkovou výplní jsou narozdíl od zástěn s plastovou výplní dodávány i s demontovanou látkovou výplní. Při montáži postupujte dle následujícího odstavce.

Po odstranění veškerého balícího materiálu, kterým je zástěna při dodání opatřena, se můžete pustit do vlastní montáže. K rámu zástěny je třeba připevnit chodidla s kolečky. Položte rám zástěny na podlahu a připevněte k jeho spodní části s přivařenou přírubou chodidla. V příbalu naleznete potřebný počet imbusových šroubů, krytek jejich hlaviček a podložek. Dále příbal obsahuje imbusový klíč, pomocí něž důkladně dotáhněte všechny šrouby a následně opatřete jejich hlavičky plastovými krytkami.

Zástěny s plastovou výplní jsou po montáži chodidel s kolečky připraveny k použití. V případě zástěn s látkovou výplní pokračujte s montáží výplně. Zástěnu postavte a navlékněte jeden konec látkové výplně na trubku, která je součástí dodávky. Trubka má jeden konec rovně zakončený naopak od druhého, který je v délce cca 1,5 cm frézovaný. Rovný konec trubky nasuňte na jazýček přivařený z vnitřní strany rámu zástěny. Druhý konec nasuňte frézovanou drážkou na protilehlý jazýček a pootočte s ní o 90° libovolným směrem. Obdobně postupujte u druhého konce látkové výplně zástěny. V případě vícedílné zástěny obdobným způsobem vyplňte i ostatní díly.



## 5. Návod k použití:

Zástěnu zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách, naopak odbrzdění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabrzděného kolečka.

## 6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme zástěnu řádně vyčistit. Zástěny čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobi či drátěnky. Látkovou výplň lze prát při teplotách do 60°C.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o zástěnu mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Zástěny nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

## 7. Údržba:

Zástěna nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu.

## 8. Servis:


Zástěna nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

## 9. Záruka:

Na zástěny je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko. Na základě nísemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autoi

## 10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví vnitřních prostorech staveb.

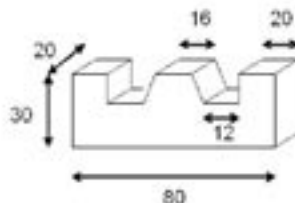

ozní  
ných

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídíte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové či ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



**Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!**

## 11. Obsah balení:

- 1 x Rám zástěny dle specifikace výše
- 1 x Sada nožiček s kolečky dle specifikace výše
- 1 x Sada spojovacího materiálu (imbusový klíč, imbusové šrouby, podložky, plastové krytky hlavy)
- 1 x Návod k použití